


# CARSON

## DR-300 ezRead elektronische Lesehilfe

### I) Batterien einlegen

- Batteriefach öffnen.
- 3 AAA Alkali-Batterien einlegen. Auf die richtige Polarität achten.
- Batteriefach schließen.

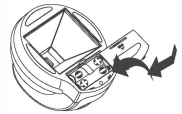


### II) Betrieb über Netzteil (alternative Stromquelle)

- Den kleinen Stecker am USB-Kabel in den Mikro USB Port am Gerät einstecken.
- Das andere Ende des USB-Kabels in das Netzteil einstecken.
- Netzteil in die Steckdose einstecken.



### III) ezRead mit dem Fernsehgerät verbinden


- Fernsehgerät in den Video-Modus umschalten. Dazu auf der Fernbedienung "Input" bzw. "TV/Video" drücken.
- ezRead per Video-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.

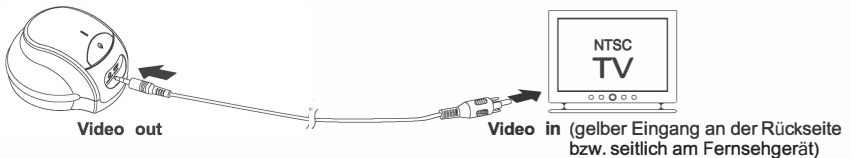

### IV) Bedienung

#### i. ezRead einschalten

Einschaltknopf drücken und 2 Sekunden gedrückt halten.

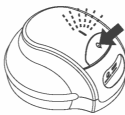


Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die LED grün auf.



#### ii. ezRead ausschalten

Einschaltknopf drücken und 2 Sekunden gedrückt halten.

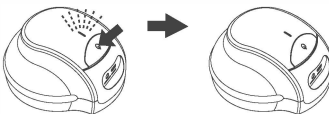

#### iii. Anzeige eines niedrigen Batteriestands

Ist ein niedriger Batteriestand erreicht, leuchtet die LED rot.

Anm.: 15 Minuten nach Betätigung des Einschaltknopfs schaltet sich das Gerät automatisch aus.

### V) Technische Daten

- Vergrößerung: 13,5x auf einem 32" TV
- Sichtfeld: 47mm x 35mm
- Beleuchtung: per LED
- Auflösung: VGA
- Schnittstelle: TV (NTSC)
- Energie: 3 x AAA Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) bzw. über USB-Kabel

### VI) Sicherheit und Pflege

- Bei längerem Nichtgebrauch, Batterien entfernen.
- Nicht versuchen, nicht aufladbare Batterien wieder aufzuladen.
- Verbrauchte und frische Batterien nicht zusammen verwenden.
- Alkali-, Zink-Kohle- bzw. wieder aufladbare Batterien (Ni-Cd) nicht zusammen verwenden.

**WARNUNG:** Zur Vermeidung möglicher dauerhafter Schädigungen der Augen, digitale Lesehilfe nicht direkt mit den Augen berühren.